

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/biodrop-md-spray-17ml-p-595.html>

## BioDrop MD Spray 17ml

Cena	<b>49,90 zł</b>
Dostępność	<b>magazyn-realizacja 24 h</b>
Czas wysyłki	<b>24 h / następny dzień roboczy</b>
Numer katalogowy	<b>PIILO_MD_SPRAY_1x17</b>
Producent	<b>PIILOSEC FINNSUSP</b>

### Opis produktu

**Piilosec BioDrop MD Spray (17 ml)**  
**mikroemulsja do spryskiwania suchych oczu i powiek**  
łagodząca objawy suchego oka  
i poprawiająca komfort noszenia soczewek.

Po zastosowaniu BioDrop MD Spray, przy każdym mrugnieniu niewielka ilość preparatu BioDrop jest rozprowadzana na powierzchni oka, co wzmacnia warstwę lipidową filmu łzowego i zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody. Efekt nawilżenia jest szybki i długotrwały.

#### Sposób użycia:

Emulsję BioDrop MD® Spray należy rozpylić na zamknięte powieki z odległości około 25 cm. Specjalny mechanizm rozpylający gwarantuje równomierne rozprowadzenie emulsji na powiekach. Dozownik umożliwia unikatowy sposób aplikacji w zakresie 360°, co oznacza, że opakowanie można ustawić również dnem do góry lub poziomo. Jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli spryskujemy powieki innej osoby.

Emulsja nie rozmazuje makijażu ani innych produktów stosowanych w okolicy oczu. Zaleca się, aby przed użyciem emulsji odczekać, aż inne produkty zostaną wchłonięte lub wyschną.

#### **BioDrop MD® Spray można stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych.**

Dozownik zawiera około 300 dawek emulsji nawilżającej.

#### Skład:

Olej z nasion rokitnika, hialuronian, glicerol i emulgatory w cytrynianowo-boranowej emulsji buforowej. Produkt nie zawiera konserwantów, alkoholu ani substancji pochodzenia zwierzęcego. Produkty Piilosec nie są testowane na zwierzętach.

#### Przechowywanie:

**Po otwarciu opakowania, produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.**  
**Przechowywać w temperaturze 5-25°C.**  
**Chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.**

---

**data ważności: 2026-05**

aktualizacja: 2025-02

---